

# CUBA CLEAN

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

rev. 250221

### APRESENTAÇÃO

A Cuba Clean é um recipiente para imersão de instrumentos diversos em detergente enzimático. Este produto proporciona mais segurança ao profissional, pois minimiza o manuseio do material contaminado, diminuindo também o risco de acidente com materiais pérfuro-cortantes.

É importante conhecer alguns aspectos do produto antes de utilizá-lo, para que não comprometa a garantia em virtude de negligência, má utilização e reparos não autorizados.

Dedicamo-nos intensamente para garantir a qualidade de nossos produtos e serviços, e assim, obtermos a plena satisfação de nossos clientes.

### ADVERTÊNCIAS PARA SEGURANÇA

- Antes de utilizar a Cuba Clean, leia atentamente este manual certificando-se de sua compreensão;
- Realize somente procedimentos descritos neste manual.

### INSTRUÇÕES DE USO

- Utilize EPI durante o procedimento: luvas descartáveis, máscara, avental, óculos de proteção e sapato fechado;
- Com o escorredor dentro da cuba, coloque 1,5 litros de água diluída e detergente enzimático, diluída de acordo com as instruções do fabricante;
- Deixe os instrumentos totalmente imersos e não sobrepostos, por aproximadamente 10 minutos;
- Com o escorredor, encaminhe os instrumentos para limpeza manual (com escova) ou automatizada (lavadora ultrassônica);
- Depois de enxaguados e secos, os instrumentos devem passar por: inspeção visual > embalagem > esterilização > armazenamento > monitorização > validade da esterilização;
- Ao final do procedimento, descarte a solução contaminada numa pia exclusiva para a limpeza de instrumentos, cuidadosamente, evitando o derramamento ou respingos fora da pia.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código: 001445	NCM: 3922.90.00
Dimensões: 10,5 x 23,0 x 31,0 cm	EAN-13: 7898599160853
Peso líquido: 0,380kg	Acompanha: cuba, escorredor e tampa
Matéria prima: Plástico PS	Garantia: 3 meses contra defeitos de fabricação
Capacidade útil: 1,5 litros	

### AVISO IMPORTANTE

- Para armazenar, mantenha a cuba limpa e seca: ao final de cada turno de trabalho, lave a cuba com água, detergente neutro biodegradável e esponja não abrasiva, enxágue e seque bem;
- Utilize somente água filtrada e detergente enzimático para imersão dos instrumentos. Não utilize produtos desincrustantes (com alta concentração ácida) que podem danificar os instrumentos e/ou a cuba;
- A água utilizada na solução não deve exceder 40°C.