



## APRESENTAÇÃO




Este é um suporte plástico para armazenar a caixa de luvas descartáveis. É ideal para organizar a área de trabalho e já vem com dupla face para ser fixada de na parede.

É importante conhecer alguns aspectos do produto antes de utilizá-lo, para que não comprometa a garantia em virtude de negligência, má utilização e reparos não autorizados.

## ADVERTÊNCIAS PARA SEGURANÇA

Antes de instalar e utilizar Porta Luvas Plástico Biovis, leia atentamente este manual, certificando-se de sua compreensão e realizando somente procedimentos nele descritos.

## INSTALAÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO

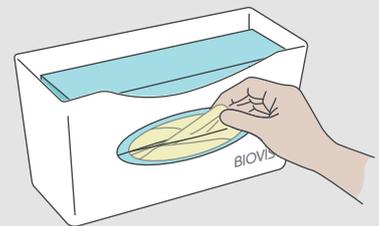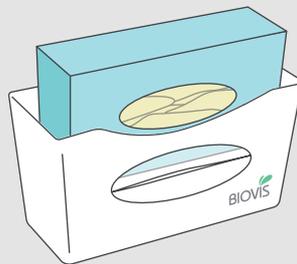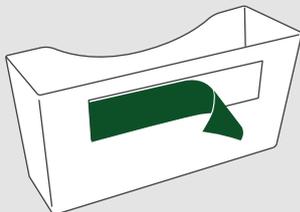

1. Instale o suporte em superfície uniforme, isenta de irregularidades, limpa e seca;
2. Remova a proteção da fita adesiva e cole o suporte na parede;
3. Abra a caixa de luvas e coloque no suporte;
4. Retire as luvas uma a uma através da película protetora.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código: 10.07	Capacidade: 1 caixa de luvas descartáveis
Dimensões: 14,0 x 26,5 x 9,5 cm	NCM: 3922.90.00
Peso líquido: 0,160kg	EAN-13: 7898599160242
Matéria prima principal: plástico PS	ACOMPANHA: fita adesiva dupla-face

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRODUTO

- Para limpeza, utilize água e detergente neutro. Seque com pano macio;
- Não utilize produtos corrosivos e/ou abrasivos;

## AVISOS IMPORTANTES

- As luvas devem permanecer na sua caixa original;
- É extremamente importante seguir corretamente os procedimentos de limpeza para conservar a integridade, manter o bom funcionamento e prolongar a vida útil do produto.



Assistência Técnica Biovis:  
 (44)3523-7884 / 99973-0029 (Whatsapp)  
 assistencia@biovis.com.br | www.biovis.com.br  
 rev.27/06/2023

### TERMOS DE GARANTIA

Garantia de **3 meses** (legais) contra defeitos de fabricação, válida a partir da data da compra.

As questões abaixo estão FORA do termo de garantia:

- Uso indevido do equipamento;
- Instalação inadequada do equipamento;
- Danos causados por reparo feito por pessoa não habilitada;
- Danos causados por falta de limpeza periódica ou limpeza com produto inadequado;
- Incêndio, enchente e outros acidentes naturais.

### SOBRE OS CUSTOS:

- Dentro do período de garantia, todos os custos são por conta da BIOVIS;
- Em caso de garantia contratual, apenas os custos de transporte são cobrados do cliente;
- Fora do período de garantia, os custos das peças e transporte são cobrados do cliente.

### ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Todo o procedimento de assistência técnica é realizado pela própria BIOVIS, a fim de garantir a originalidade das peças, qualidade no serviço e o melhor custo-benefício, haja visto que não cobramos pelo serviço, caso o produto esteja no período de garantia.

Entre em contato pelos canais de atendimento (44)3523-7884 / 99973-0029 / [assistencia@biovis.com.br](mailto:assistencia@biovis.com.br).



